

— Guida al trattamento
Versione 1.2



Reform Your Youth



ULTRAFORMER

.....MPT—

MMFU

Ultrasuoni micro e macro focalizzati
Lifting non chirurgico, rassodamento e sistema di contouring

Indice

Introduzione

- Sistema ULTRAFORMER MPT
- Cartucce ULTRAFORMER MPT
- Cartucce manipolo ULTRA F
 - MPT 1.5
 - MPT 2.0
 - MPT 3.0
 - MPT 4.5
 - MPT 6.0
 - MPT 9.0
 - MPT 13.0
- Cartucce manipolo ULTRA BOOSTER
 - DERMA BOOSTER 1.5
 - CELL UP BOOSTER 3.0
 - LINE UP BOOSTER 4.5

Precauzioni per il trattamento

- Controindicazioni
- Selezione dei pazienti
- Potenziali effetti collaterali
- Precauzioni
- Consulto con il paziente
- Gestione del dolore
- Nervi da evitare

Trattamento

- Preparazione al trattamento
- Precauzioni per le procedure viso e corpo
- Fasi di trattamento per viso e décolleté
- Parametri per viso e décolleté
- Fasi di trattamento per il corpo
- Parametri per viso e corpo

ULTRAFORMER

.....MPT

TRATTAMENTO

Le seguenti linee guida e precauzioni sono finalizzate all'esecuzione di procedure corrette sul paziente con il sistema ULTRAFORMER MPT.

Fare riferimento a queste istruzioni per eseguire trattamenti sicuri e di successo con ULTRAFORMER MPT.



Introduzione

Sistema ULTRAFORMER MPT

ULTRAFORMER MPT

Cartucce manipolo ULTRA F



ULTRAFORMER MPT

Cartucce manipolo ULTRA BOOSTER



ULTRAFORMER MPT è un dispositivo non invasivo per lifting e rassodamento del viso e per rassodamento e contouring del corpo, che offre procedure di trattamento personalizzate per tutto il viso, il collo e il corpo. Utilizzando la tecnologia HIFU con cartucce micro e macro focalizzate, ULTRAFORMER MPT concentra energia ultrasonica in modo uniforme, inducendo una coagulazione termica nel viso e contrazioni nel corpo.

Precauzioni per il trattamento

Controindicazioni

ULTRAFORMER MPT è controindicato per l'uso su pazienti con:

- Gravidanza o allattamento
- Ferite o lesioni aperte sulla zona di trattamento
- Acne grave o cistica sulla zona di trattamento
- Stent metallici/impianti elettrici nella zona di trattamento
- Impianti meccanici bioassorbibili
- Infezioni cutanee di qualsiasi tipo
- Disturbi o disfunzioni emorragiche

Precauzioni per il paziente

Determinare se il trattamento è appropriato per i pazienti con le seguenti condizioni:

- Terapia anticoagulante
- Disturbi della pelle causati da malattie autoimmuni, cancro della pelle e Herpes Simplex
- Diabete o epilessia
- Gravi malattie della pelle
- Decorticazione o malattie cardiache
- Ipersensibilità o cicatrici ipertrofiche
- Disfunzioni emostatiche

Selezione dei pazienti

I pazienti che soddisfano i seguenti requisiti sono preferibili per ottenere risultati migliori:

- Pazienti con una quantità sufficiente di cellule di grasso ostinato sulla zona di trattamento
- assenza di grandi cicatrici o pieghe cutanee sulla zona di trattamento
- Lassità cutanea da lieve a moderata con tessuto morbido
- Pelle grinzosa e rugosa
- Pazienti con linee sopraccigliari abbassate, pelle lassa, rughe o rughe sottili

Potenziati effetti collaterali

I pazienti che ricevono ULTRAFORMER MPT possono avere reazioni lievi e temporanee come quelle riportate di seguito:

- Edema (gonfiore)
- Eritema (arrossamento)
- Indolenzimento
- Lividi
- Cicatrici
- Intorpidimento o formicolio transitorio
- Dolore o fastidio temporaneo
- Bruciature e croste
- Sintomi neurologici

* Il medico deve consultare il paziente in caso di storia di forte dolore o lieve disagio durante i trattamenti topici non invasivi, compreso ULTRAFORMER MPT.

Precauzioni per la procedura

Per evitare rischi per la sicurezza durante il trattamento con ULTRAFORMER MPT:

- Non utilizzare ULTRAFORMER MPT senza aver completato la formazione da parte di un rappresentante autorizzato CLASSYS.
- Per evitare l'uso non autorizzato del dispositivo, assicurarsi che l'accesso sia limitato esclusivamente al personale formato e certificato.
- Per evitare possibili lesioni durante il trattamento, non applicare i manipoli di ULTRAFORMER MPT vicino agli occhi del paziente.
- Evitare di applicare il trattamento su tiroide, cartilagine tiroidea e trachea.
- Evitare di applicare il trattamento direttamente sul tessuto mammario e sui vasi principali.
- Se si verificano malfunzionamenti o eventi avversi, interrompere immediatamente la procedura di trattamento.
- Applicare sempre il gel per ultrasuoni sulle zone target prima di procedere al trattamento con ULTRAFORMER MPT.
- Prima di emettere i colpi, verificare che la cartuccia collegata al trasduttore sia applicata correttamente sulla pelle.
- Interrompere immediatamente il trattamento se la superficie della pelle brucia o lo strato superficiale esterno della pelle si solleva gonfiandosi.

Precauzioni per il trattamento

Precauzioni per la sicurezza del sistema

Per garantire la sicurezza del sistema e la corretta manutenzione di ULTRAFORMER MPT:

- Per evitare l'uso non autorizzato di ULTRAFORMER MPT, conservarlo in un ambiente controllato e accessibile solo a personale autorizzato e formato.
 - Per motivi di sicurezza, emettere un colpo di prova con la cartuccia prima di eseguire una procedura.
 - Per evitare il rischio di scosse elettriche, ispezionare sempre cartuccia, manipolo e cavo prima dell'uso.
 - Non utilizzare o sostituire un cavo o una cartuccia danneggiati o con perdite di liquido.
 - Se la cartuccia è danneggiata o rotta, non utilizzarla e sostituirla per far funzionare il sistema.
 - Per un funzionamento sicuro del sistema, l'alimentazione deve essere di 100-240V~, 50/60Hz.
 - Non collocare il sistema in prossimità di luce solare diretta, umidità elevata o dispositivi di riscaldamento vicini.
 - Il gel utilizzato per il trattamento non deve essere lasciato sul manipolo o sulla cartuccia.
 - Non toccare il cavo di alimentazione CA con le mani bagnate.
 - Spegnerne l'interruttore di alimentazione CA e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa prima di pulire il corpo principale.
 - Non rimuovere le coperture del manipolo.
 - ULTRAFORMER MPT non contiene componenti riparabili dall'utente. Se il sistema necessita di assistenza, contattare il distributore locale o il rappresentante CLASSYS.
 - Non sporgersi obliquamente sull'apparecchiatura e non sottoporla a urti fisici esterni che potrebbero causare danni permanenti al sistema.
 - Non utilizzare l'apparecchiatura con gas anestetici o materiali infiammabili nelle aree circostanti.
- * Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alla manutenzione di ULTRAFORMER MPT.

Consulto con il paziente

Per una valutazione accurata e un piano di trattamento del paziente:

- Controllare l'anamnesi del paziente.
- Verificare la presenza di eventuali interventi chirurgici eseguiti in passato sulle zone proposte per il trattamento.
- Rispondere ai dubbi del paziente su ogni singola preferenza del viso e del corpo.
- Consultare i pazienti sui loro livelli di tolleranza al dolore per determinare se la somministrazione di farmaci antidolorifici sia appropriata.
- Coordinare i trattamenti personalizzati con il paziente.

Gestione del dolore

Per i pazienti che riferiscono livelli di sensibilità al dolore più elevati, si raccomanda quanto segue durante il trattamento:

- Anestetici locali o topici
- Farmaci antidolorifici orali
- Crema anestetica topica

* Dopo il trattamento non sono necessari altri farmaci antidolorifici.


Nervi da evitare

Zone con nervi da evitare durante il trattamento:

- Ombelico
- Spina iliaca posteriore superiore (SIPS)
- Nervi pelvici
- Nervi ulnari
- Nervi sciatici
- Nervo mandibolare marginale
- Nervi facciali temporali
- Nervi facciali sovraorbitali

* Se il paziente avverte un dolore o un formicolio eccessivo in una zona specifica, interrompere la procedura e passare al sito di trattamento successivo.

* Personalizzare i parametri in base alla sensibilità e ai livelli di tolleranza del paziente.

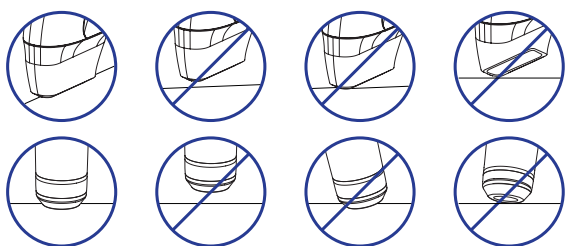

 **NON erogare colpi senza aver stabilito un contatto corretto tra la cartuccia e la pelle.**

 **NON premere il pulsante di emissione dei colpi o l'interruttore a pedale del manipolo senza aver applicato il gel per ultrasuoni sulla zona da trattare.**

Trattamento

Intero viso + Doppio mento + Trattamento del collo

VISO

Rami sopraorbitali

Rami temporali


Nervi mandibolari marginali

Nervo ulnare

SIPS (Spina iliaca posteriore superiore)

Nervo sciatico

CORPO

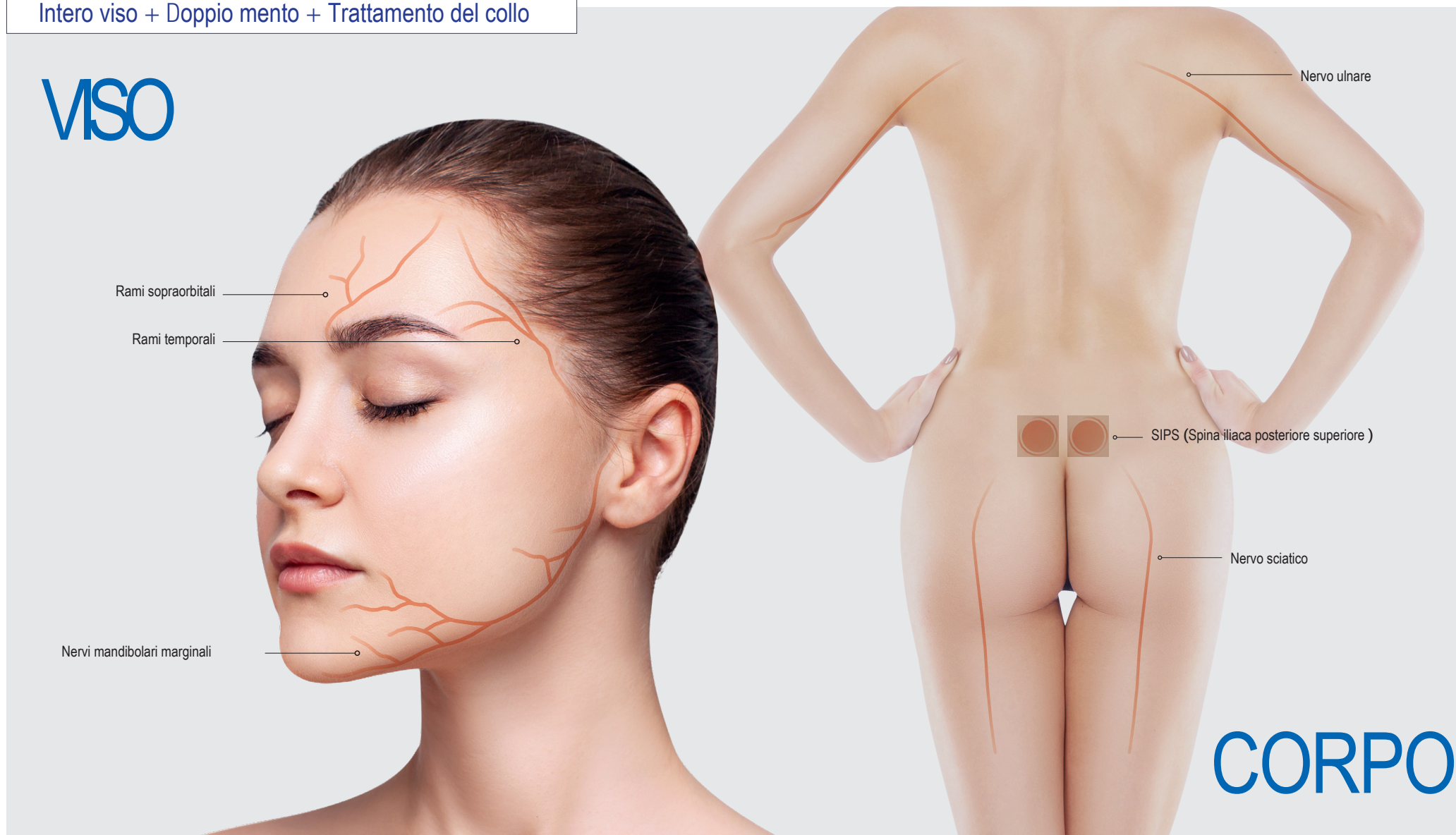

Trattamento

Preparazione al trattamento



Guanti in lattice



Gel per ultrasuoni



Fazzoletti

1. Pulire la zona da trattare.
2. Contrassegnare le zone da trattare secondo il piano di trattamento previsto.
3. Controllare lo stato delle cartucce.
4. Assicurarsi di applicare una quantità adeguata di gel per ultrasuoni sulle zone target prima di procedere al trattamento.

Trattamento

Precauzioni per le procedure viso e corpo

○Precauzioni per le procedure viso e décolleté

- Non applicare il trattamento sulle zone ossee e sulle regioni nervose.
- Non applicare il trattamento direttamente su regione mammaria, clavicola, nervi sovraorbitali, temporali o mandibolari marginali.
- Quando si trattano le zone del viso, applicare il trattamento su un lato alla volta prima di procedere all'altro.
- Non emettere colpi consecutivi sullo stesso sito di trattamento.
- Evitare di applicare il trattamento su punti specifici che potrebbero scatenare sensazioni di formicolio nel paziente.
- Dopo aver emesso alcuni colpi, verificare le reazioni cutanee e il livello di sensibilità del paziente. Procedere al trattamento o alla riduzione dei parametri in base al livello di tolleranza del paziente.
- Assicurarsi sempre di distribuire in modo uniforme i colpi sulla zona di trattamento contrassegnata.
- Quando si trattano più strati, trattare dallo strato più profondo a quello meno profondo in ordine sequenziale come segue:
Es: 4.5mm --> 3.0mm --> 1.5mm

○Precauzioni per le procedure corpo

- Non applicare il trattamento sulle zone ossee e sulle regioni nervose.
- Non applicare il trattamento direttamente su ombelico, spina iliaca postero-superiore (SIPS), nervi pelvici, ulnari o sciatici.
- Quando si trattano zone del corpo, applicare il trattamento su un lato alla volta prima di passare all'altro.
- Evitare di applicare il trattamento su punti specifici che potrebbero provocare formicolii nel paziente.
- Dopo aver emesso alcuni colpi, verificare le reazioni cutanee e il livello di sensibilità del paziente. Procedere al trattamento o alla riduzione dei parametri in base al livello di tolleranza del paziente.
- Assicurarsi di distribuire in modo uniforme i colpi sulla zona di trattamento contrassegnata.
- I pazienti devono soddisfare gli standard di ciascuna cartuccia corpo, in base al pinch test della pelle e alla zona da trattare:
MPT 6.0: pinch test 12mm o più
MPT 9.0: pinch test 18mm o più
MPT 13.0: pinch test 26 mm o più

⚠ Quando si tratta con le cartucce ULTRA F e ULTRA BOOSTER in modalità Colpi ripetuti assicurarsi che la cartuccia sia sempre in movimento dopo l'erogazione di ogni colpo.

⚠ Quando si tratta con le cartucce ULTRA F e ULTRA BOOSTER in modalità Colpo singolo, assicurarsi di mantenere la cartuccia ferma durante l'erogazione dei colpi.

Trattamento

Fasi di trattamento per viso e décolleté

1. Accensione del sistema

Premere il simbolo "I" sull'interruttore di alimentazione CA sul retro del corpo principale e premere il pulsante di accensione sul monitor per accendere il sistema.

2. Selezione delle cartucce

Selezionare profondità e tipo di cartuccia appropriati in base alla valutazione del paziente e alla zona di trattamento interessata.

3. Ispezione delle cartucce

Prima di procedere al trattamento, verificare sempre le condizioni fisiche della cartuccia e che non vi siano residui di gel per ultrasuoni o particelle di polvere.

4. Applicazione del gel per ultrasuoni

Applicare una quantità adeguata di gel per ultrasuoni sulla zona di trattamento come agente lubrificante tra il manipolo e la pelle durante la procedura. Assicurarsi di riapplicare sempre una quantità adeguata di gel per ultrasuoni quando necessario.

5. Caricamento dell'interfaccia del manipolo

Rimuovere il manipolo dal suo supporto e la funzione di riconoscimento automatico del manipolo caricherà l'interfaccia grafica utente (GUI) sull'interfaccia del manipolo corrispondente.

6. Impostazione di parametri e preferenze

Impostare i parametri e le preferenze sull'interfaccia grafica utente (GUI) e premere il pulsante STANBY per preparare il sistema. È possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

- Fluenza dell'energia
- Pitch/Lunghezza
- Modalità colpo
singolo/colpi ripetuti
- Modalità normale/MP
- Allarme
- Timer
- Volume

*Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida alla manutenzione di ULTRAFORMER MPT.

Trattamento

Fasi di trattamento per il corpo

1. Accensione del sistema

Premere il simbolo "I" sull'interruttore di alimentazione CA sul retro del corpo principale e premere il pulsante di accensione sul monitor per accendere il sistema.

2. Selezione di cartucce e manipoli

Selezionare profondità e tipo di cartuccia appropriati in base alla valutazione del paziente e alla zona di trattamento interessata.

MPT 6.0: skin pinch test → 12mm o più

MPT 9.0: skin pinch test → 18mm o più

MPT 13.0: skin pinch test → 26mm o più

3. Ispezione della cartuccia

Controllare sempre le condizioni fisiche della cartuccia e che non vi siano residui di gel per ultrasuoni o particelle di polvere prima di procedere al trattamento.

4. Applicazione del gel per ultrasuoni

Applicare una quantità adeguata di gel per ultrasuoni sulla zona di trattamento come agente lubrificante tra il manipolo e la pelle durante la procedura. Assicurarsi di riapplicare sempre una quantità adeguata di gel quando necessario.

5. Caricamento dell'interfaccia del manipolo

Rimuovere il manipolo dal suo supporto e la funzione di riconoscimento automatico del manipolo caricherà l'interfaccia grafica utente (GUI) sull'interfaccia del manipolo corrispondente.

6. Impostazione di parametri e preferenze

Impostare i parametri e le preferenze sull'interfaccia grafica utente (GUI) e premere il pulsante STANBY per preparare il sistema. È possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

- Fluenza dell'energia
- Pitch/Lunghezza
- Modalità colpo singolo/
colpi ripetuti
- Modalità normale/MP
- Allarme
- Timer
- Volume
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida alla manutenzione di ULTRAFORMER MPT.

Trattamento

7. Applicazione del manipolo

Applicare il manipolo in piano sulla zona da trattare e premere il pulsante di emissione del colpo o l'interruttore a pedale per emettere l'energia a ultrasuoni.

*Per ulteriori dettagli su come evitare le zone ossee e le regioni nervose quando si applica il manipolo ULTRAFORMER MPT durante il trattamento, fare riferimento alle precauzioni specifiche riportate di seguito in ogni sezione di trattamento e alle "Precauzioni per le procedure corpo" di questa Guida al trattamento.

Modalità colpo singolo

- La modalità colpo singolo richiede la pressione del pulsante di emissione colpi o dell'interruttore a pedale per ogni colpo da erogare.

⚠ Gli ultrasuoni non devono essere applicati consecutivamente sullo stesso sito di trattamento.

8. Sospendere o interrompere le procedure Per mettere in pausa o interrompere l'uso della cartuccia corpo, premere READY per tornare allo stato di STANDBY sull'interfaccia grafica utente (GUI).

⚠ Quando si esegue il trattamento con la cartuccia corpo in modalità colpo singolo, assicurarsi di mantenere la cartuccia ferma durante l'emissione dei colpi.

9. Pulizia di cartucce e manipolo

Pulire la cartuccia con un tampone di preparazione standard al 50-70% di alcool isopropilico prima di inserirla nel suo supporto per manipolo.

10. Pulizia della zona di trattamento

Pulire la zona di trattamento per rimuovere eventuali residui di gel per ultrasuoni con fazzoletti umidi o tamponi di cotone.

Modalità colpi ripetuti

- La modalità colpi ripetuti richiede di tenere premuto il pulsante di emissione dei colpi o l'interruttore a pedale per un'erogazione continua.

8. Sospendere o interrompere le procedure

Per mettere in pausa o interrompere l'uso della cartuccia corpo in modalità colpi ripetuti, rilasciare il dito dal pulsante di emissione colpi o il piede dall'interruttore a pedale per interrompere l'emissione continua dei colpi e premere READY per tornare allo stato di STANDBY sull'interfaccia grafica utente (GUI).

⚠ Quando si esegue il trattamento con la cartuccia corpo in modalità colpi ripetuti, assicurarsi di mantenere sempre la cartuccia in costante movimento dopo ogni colpo erogato.


Trattamento

Glowing



* Utilizzo della cartuccia DERMA BOOSTER

Modalità	Cartuccia(BOOSTER)	Energia	Pitch	Totale
Normale	1.5mm	0.2-0.3J	1.0-1.5mm	200~250
MP	1.5mm	0.2-0.3J	-	200~250

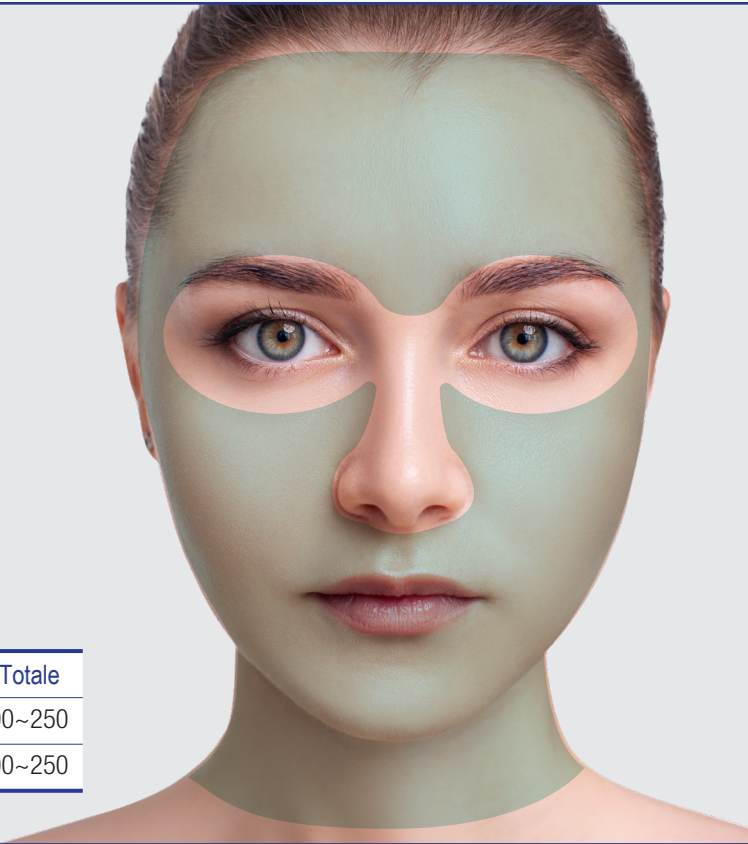


Miglioramento del tono della pelle



* Utilizzo della cartuccia DERMA BOOSTER


Modalità	Cartuccia(BOOSTER)	Energia	Pitch	Totale
Normale	1.5mm	0.2-0.3J	1.0-1.5mm	200~250
MP	1.5mm	0.2-0.3J	-	200~250

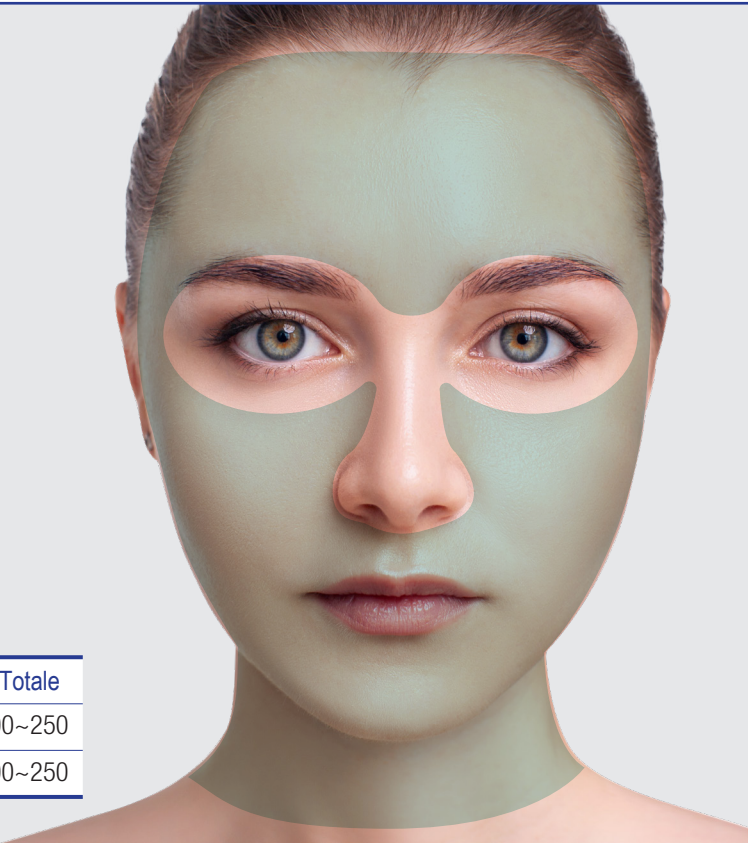

Trattamento


Rughe sulla fronte

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 1.5mm	0.1-0.2J	1.0-1.5mm	55	1
MP	○ 1.5mm	0.1-0.2J	-	55	1

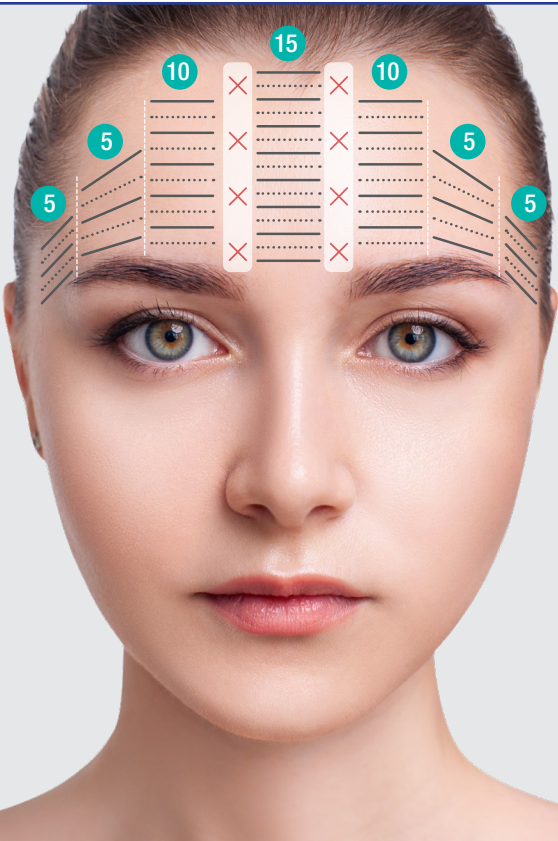

Lifting delle sopracciglia

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 2.0mm	0.2-0.3J	1.0-1.5mm	40-50	1
MP	○ 2.0mm	0.2-0.3J	-	40-50	1

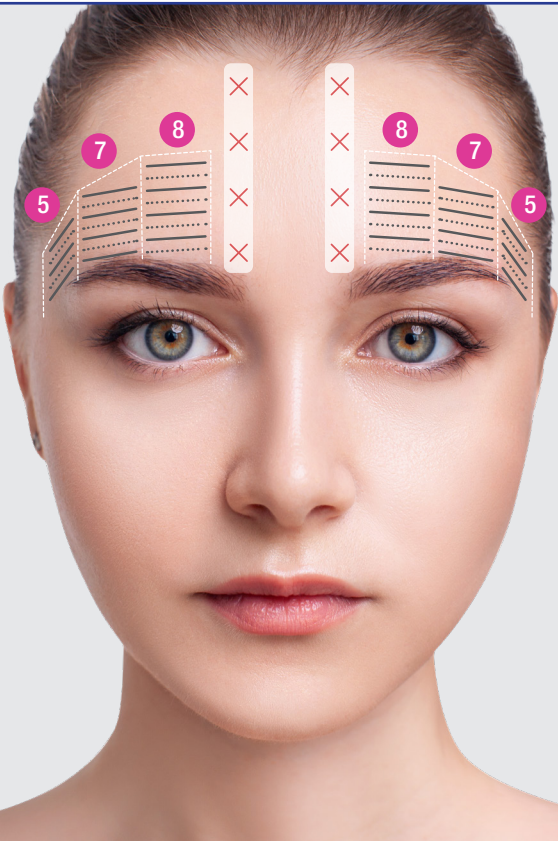

Trattamento


Rughe sulla palpebra inferiore

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 2.0mm	0.1-0.2J	1.0-1.5mm	100	2
MP	○ 2.0mm	0.1-0.2J	-	100	2




Borse

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 2.0mm	0.2-0.3J	1.0-1.5mm	50-75	1-2
MP	○ 2.0mm	0.2-0.3J	-	50-75	1-2

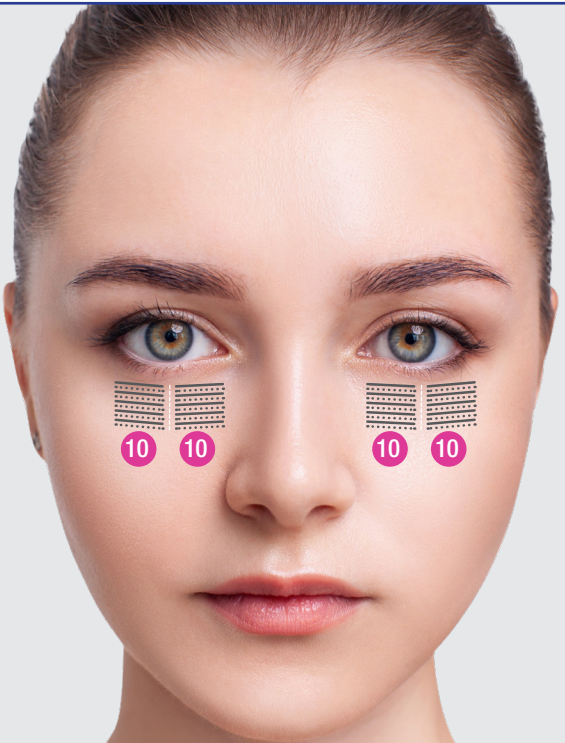

Trattamento

Piega nasolabiale

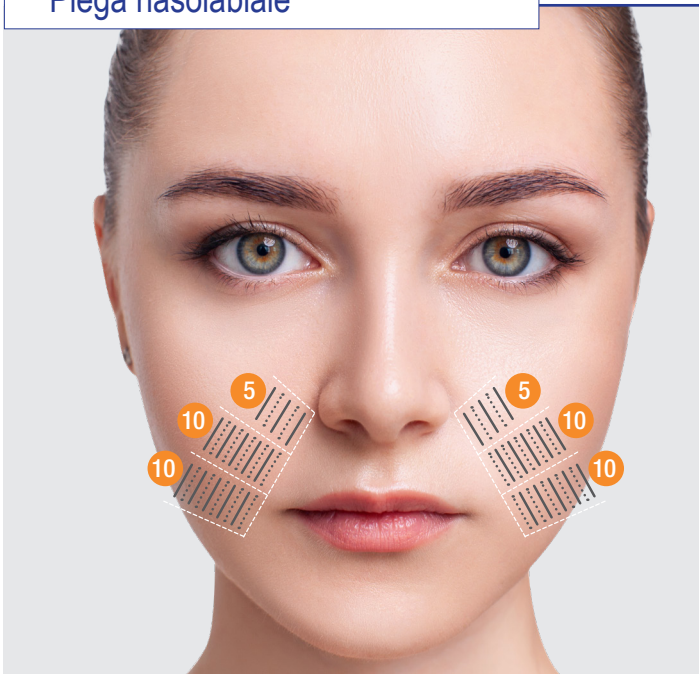

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 3.0mm	0.4-0.5J	1.0-1.5mm	50-60	2
MP	○ ● 3.0mm	0.4-0.5J	-	50-60	2

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 2.0mm	0.2-0.3J	1.0-1.5mm	50	2
MP	○ ● 2.0mm	0.2-0.3J	-	50	2

Contouring della parte inferiore del viso / Rughe della marionetta



Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 4.5mm	0.6-0.7J	1.0-1.5mm	60	1
MP	○ ● 4.5mm	0.4-0.6J	-	60	1

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 3.0mm	0.4-0.5J	1.0-1.5mm	90	1
MP	○ ● 3.0mm	0.4-0.5J	-	90	1


Trattamento

Lifting SMAS (metà viso)



* Uso della cartuccia CELL UP BOOSTER

Modalità	Cartuccia(BOOSTER)	Energia	Pitch	Totale
Normale	● 3.0mm	0.3-0.5J	1.0-1.5mm	150~200
MP	○ 3.0mm	0.3-0.5J	-	150~200

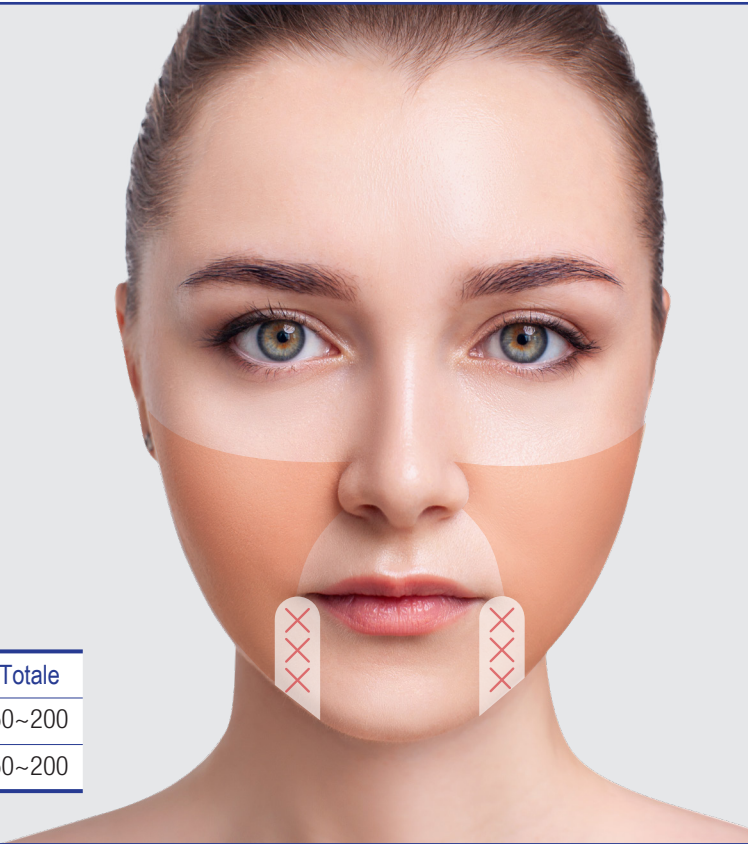

Lifting SMAS (viso inferiore)




* Uso cartuccia LINE UP BOOSTER

Modalità	Cartuccia(BOOSTER)	Energia	Pitch	Totale
Normale	● 4.5mm	0.4-0.5J	1.0-1.5mm	100~150
MP	○ 4.5mm	0.4-0.5J	-	100~150



Trattamento



Contouring mandibola (riduzione grasso guance)

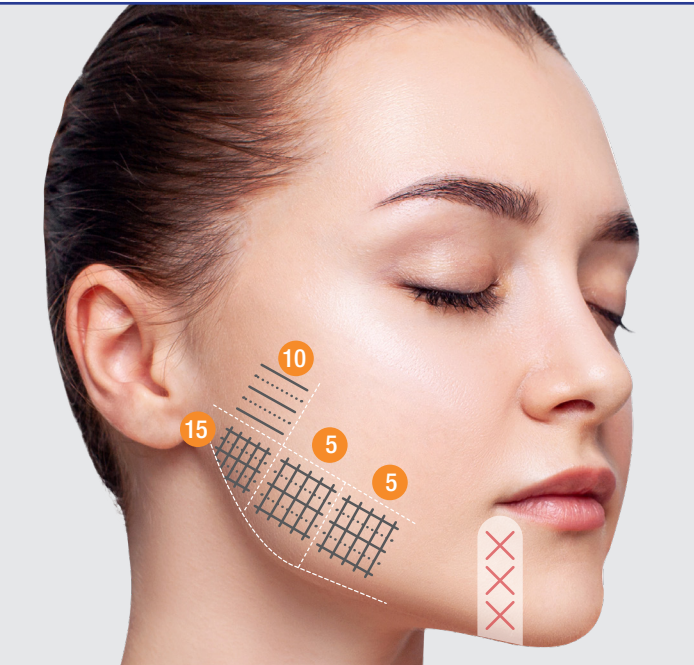

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 4.5mm	0.6-0.7J	1.0-1.5mm	30	1
MP	○ ● 4.5mm	0.4-0.6J	-	30	1

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 3.0mm	0.5-0.7J	1.0-1.5mm	35	1
MP	○ ● 3.0mm	0.4-0.5J	-	35	1

Contouring mandibola (guance cadenti)

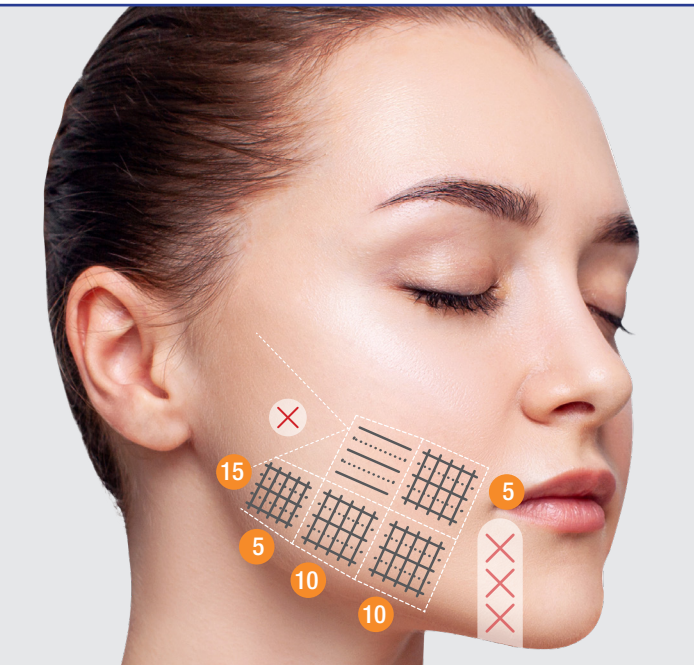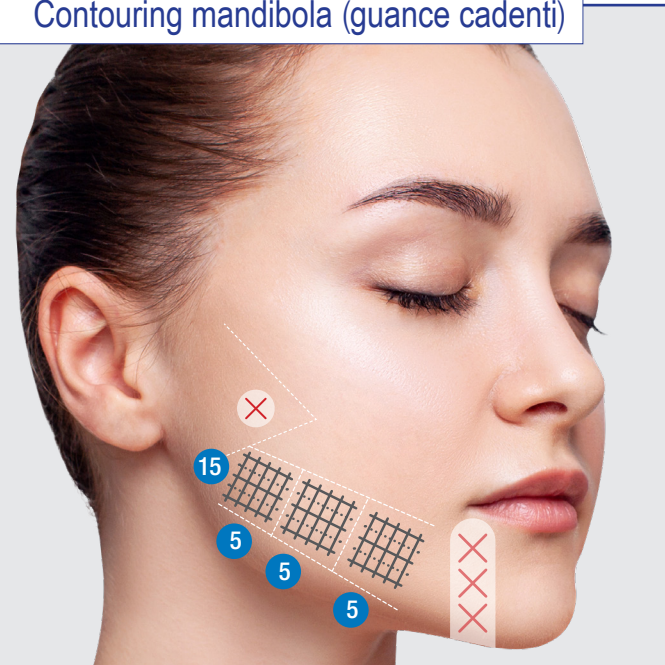

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 4.5mm	0.6-0.7J	1.0-1.5mm	30	1
MP	○ ● 4.5mm	0.4-0.5J	-	30	1


Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 3.0mm	0.5-0.7J	1.0-1.5mm	45	1
MP	○ ● 3.0mm	0.3-0.4J	-	45	1

* Nota: le guance cadenti sono contrassegnate da una X.

Trattamento

Rughe periorali

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 2.0mm	0.2-0.3J	1.0-1.5mm	100	1
MP	○ 2.0mm	0.2-0.3J	-	100	1

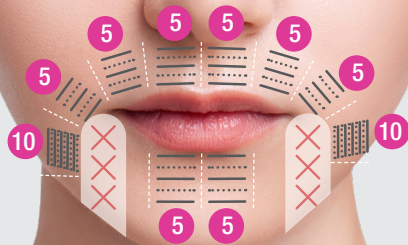

Pieghe del collo


Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 3.0mm	0.4-0.5J	1.0-1.5mm	50	2
MP	○ 3.0mm	0.3-0.4J	-	50	2

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 2.0mm	0.1-0.3J	1.0-1.5mm	100	2
MP	○ 2.0mm	0.1-0.3J	-	100	2

* Nota: La cartilagine tiroidea è contrassegnata da una X. Non erogare colpi su questa zona.

Trattamento

Doppio mento

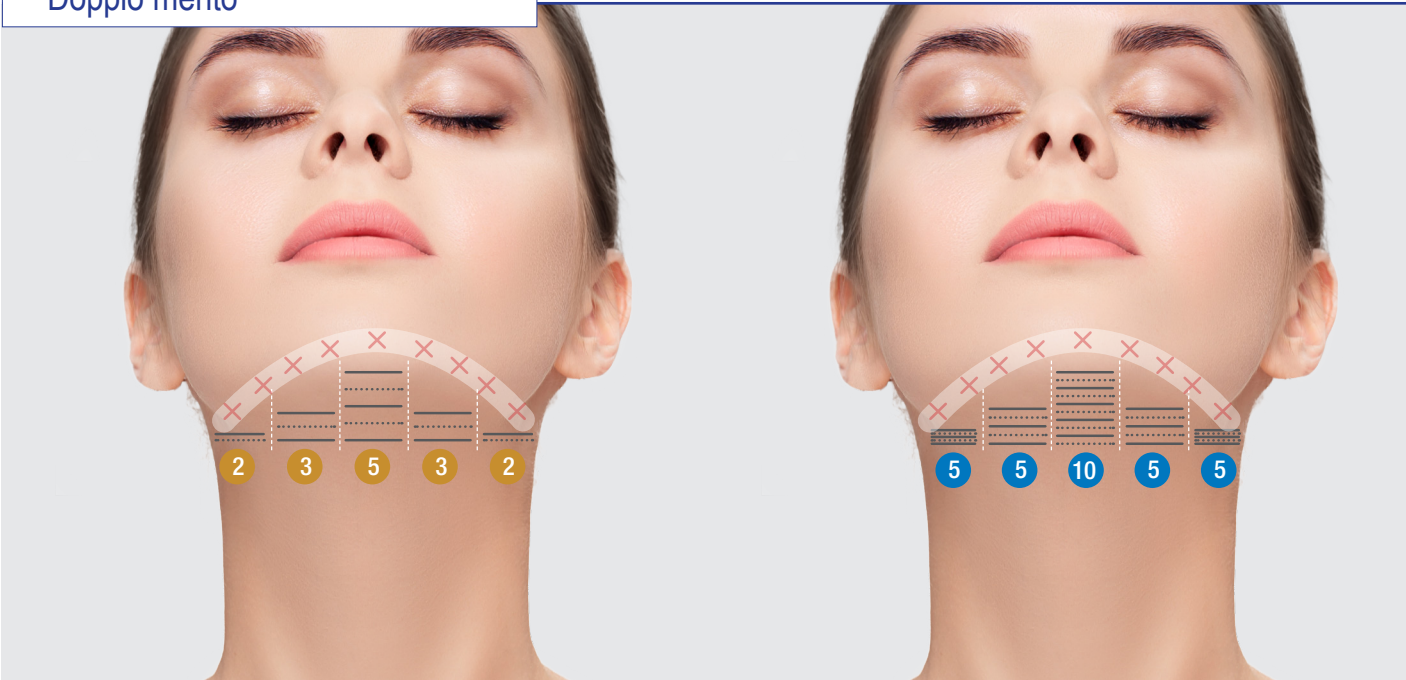

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 6.0mm	0.6-0.8J	1.0-1.5mm	50	2
MP	○ 6.0mm	0.6-0.8J	-	50	2

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 4.5mm	0.4-0.6J	1.0-1.5mm	60	2
MP	○ 4.5mm	0.4-0.6J	-	60	2

* Nota: Non sparare sopra la zona ossea contrassegnata da X.

Trattamento

Décolleté

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 4.5mm	0.3-0.5J	1.0-1.5mm	60	1
MP	○ ● 4.5mm	0.3-0.5J	-	60	1

* Nota: La cartuccia da 4,5 mm non è consigliata per i pazienti con uno strato cutaneo sottile.

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 3.0mm	0.3-0.5J	1.0-1.5mm	50	1
MP	○ ● 3.0mm	0.3-0.5J	-	50	1

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	● 1.5mm	0.1-0.2J	1.0-1.5mm	50	1
MP	○ ● 1.5mm	0.1-0.2J	-	50	1

Trattamento


Parte superiore delle braccia



Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
MP 	 6.0mm	0.6-0.8J	-	100	2
MP 	 4.5mm	0.6-1.0J	-	100	2
MP 	 3.0mm	0.4-0.6J	-	100	2

* Nota: Questi parametri sono applicati per ogni braccio.

Ascelle

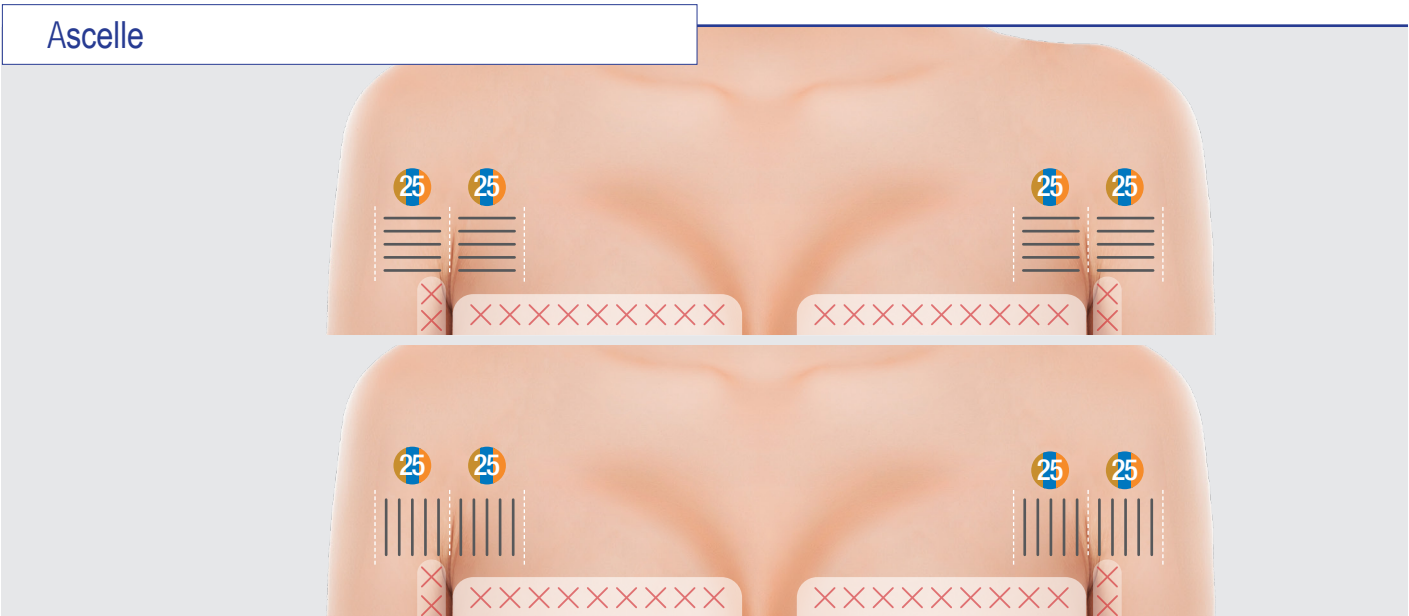


Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
MP 	 6.0mm	0.3-0.5J	-	100	2
MP 	 4.5mm	0.3-0.5J	-	100	2
MP 	 3.0mm	0.3-0.5J	-	100	2

* Nota: Questi parametri sono applicati per ogni ascella.

Trattamento

Maniglie dell'amore

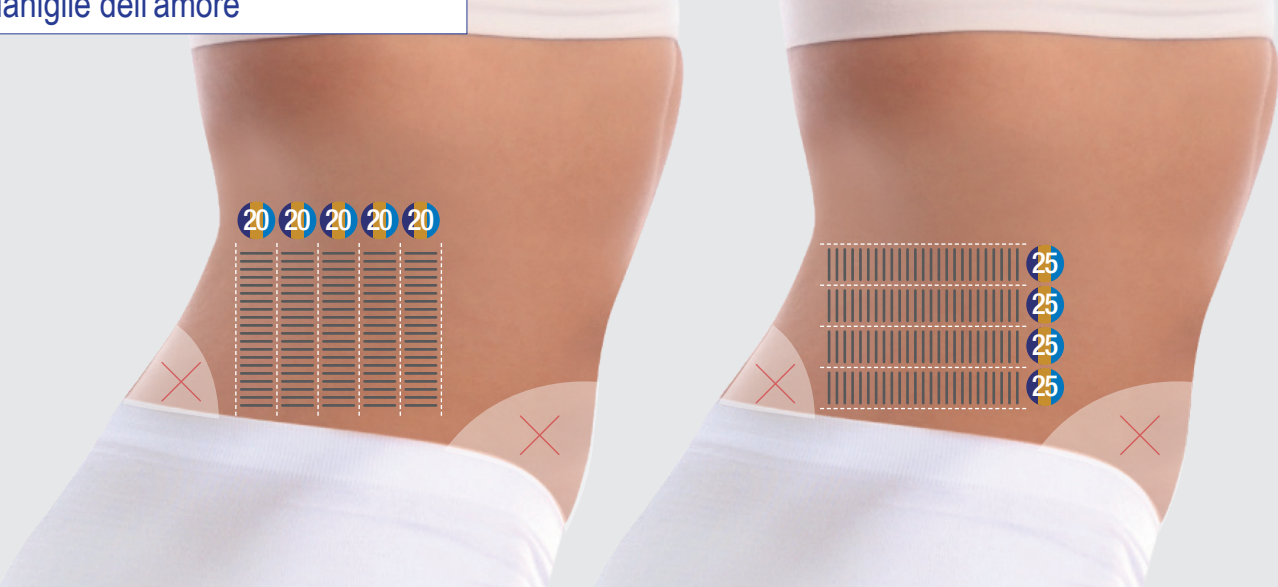


The diagram shows two views of a person's back. The left view shows a grid of treatment points on the upper back, with energy values of 20. The right view shows a grid of treatment points on the lower back, with energy values of 25. Red 'X' marks indicate areas to avoid.

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
MP ○	● 9.0mm	0.8-1.5J	-	200	2
MP ○	● 6.0mm	0.8-1.2J	-	200	2
MP ○	● 4.5mm	0.8-1.0J	-	200	2

* Nota: Questi parametri sono applicati per ogni lato delle maniglie dell'amore.

Addome

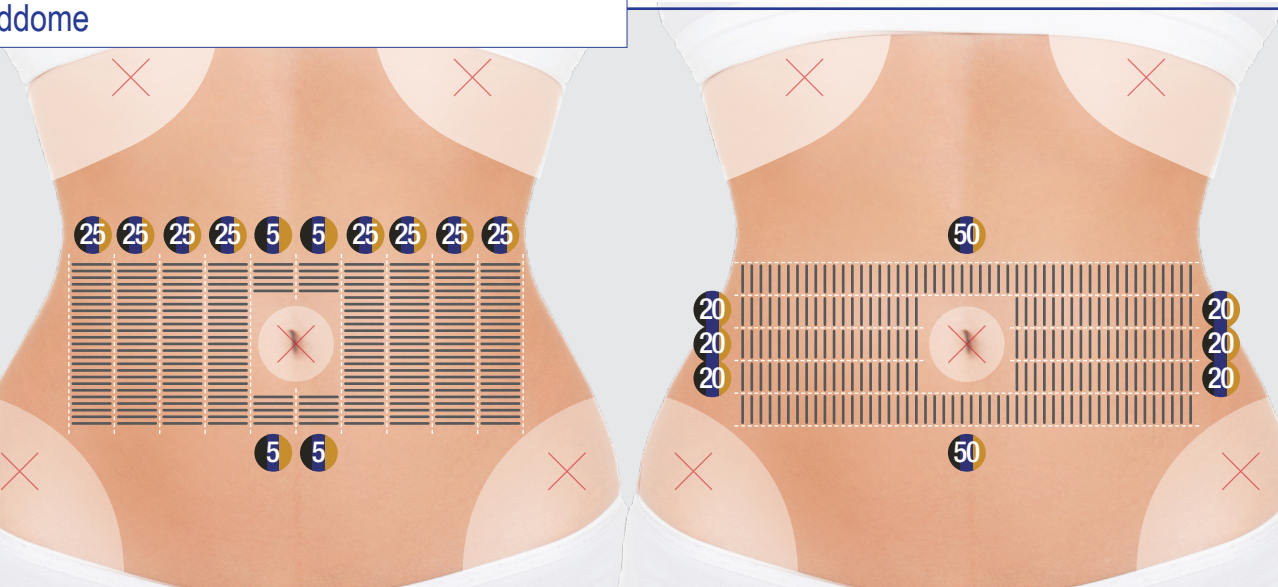


The diagram shows two views of a person's abdomen. The left view shows a grid of treatment points on the upper abdomen, with energy values of 25 and 5. The right view shows a grid of treatment points on the lower abdomen, with energy values of 20 and 50. Red 'X' marks indicate areas to avoid.

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
MP ○	● 13.0mm	1.2-1.6J	-	300	2
MP ○	● 9.0mm	1.2-1.6J	-	300	2
MP ○	● 6.0mm	0.8-1.2J	-	300	2

Trattamento


Ginocchia

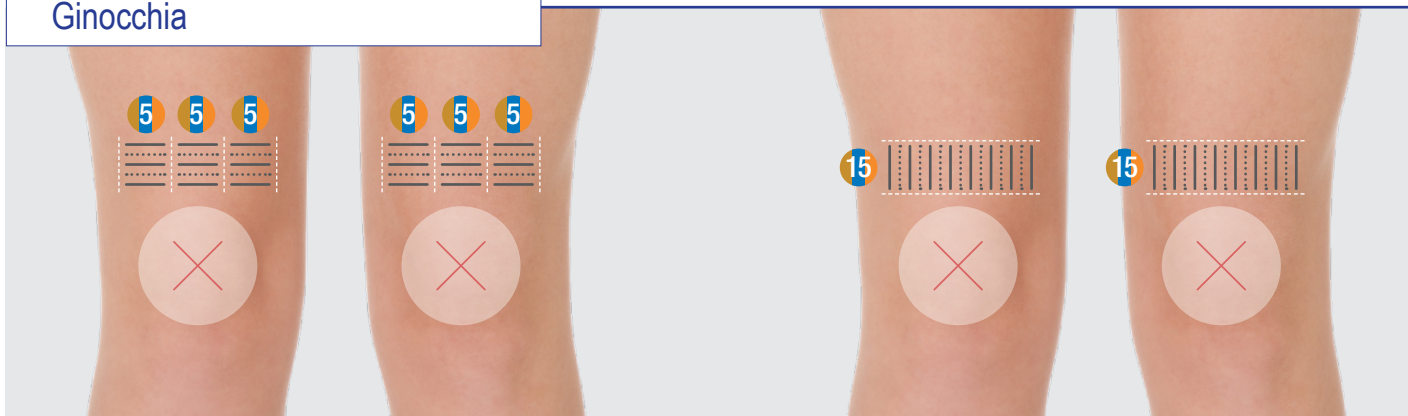

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
Normale	6.0mm	0.6-0.9J	1.0-1.5mm	25	1
MP	6.0mm	0.6-0.8J	-	25	1
Normale	4.5mm	0.6-0.9J	1.0-1.5mm	25	1
MP	4.5mm	0.6-0.8J	-	25	1
Normale	3.0mm	0.5-0.8J	1.0-1.5mm	25	1
MP	3.0mm	0.4-0.6J	-	25	1

* Nota: Questi parametri sono applicati per ogni ginocchio.

Coscia

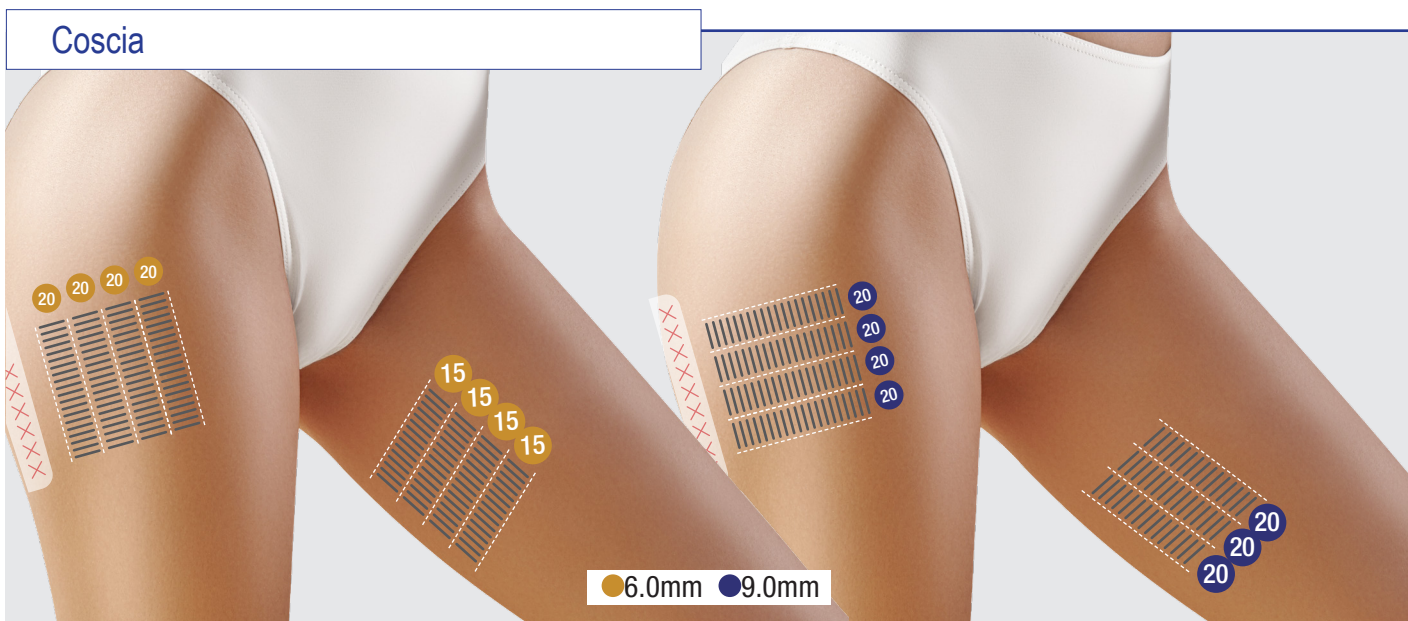

● 6.0mm ● 9.0mm

Modalità	Cartuccia(MPT)	Energia	Pitch	Totale	Passaggi
MP	9.0mm	0.6-0.8J	-	280	3
MP	6.0mm	0.6-0.8J	-	280	3

* Nota: Questi parametri sono applicati per ogni lato della coscia.

Per un uso corretto e professionale di ULTRAFORMER MPT, consultare il materiale didattico supplementare.

- Guida alla manutenzione
- Guida all'installazione
- Guida rapida all'uso
- Manuale operativo

Per ulteriori informazioni contattare:
info@classsys.com

GUIDA AL TRATTAMENTO

Produttore CLASSYS Inc.

Tel +82-2-517-2114

Fax +82-2-6008-3457

Website www.classsys.com **E-mail** info@classsys.com